

Paquete de Parto

Código: 75-P352S



Empaque:

6 unidades / caja



Descripción:

Paquete quirúrgico estéril desechable, diseñado para procedimientos de parto ajustable al paciente. Sus componentes, mantienen una adaptación de cobertura resistente e impermeable en la zona de cirugía a intervenir. Su campo bajo glúteo ofrece una rápida y fácil aplicación, ya que posee un refuerzo absorbente que ayuda a controlar los fluidos además de poseer un campo adicional quirúrgico para la protección abdominal del paciente.

A) Especificaciones Técnicas

- El paquete provee una excelente comodidad al usuario y es recomendable para personal de salud que ejerza una interacción directa con pacientes en zonas estrictas de esterilidad en pabellón.
- Contiene 14 piezas estériles, con campos impermeables y absorbentes de color celeste elaborado a base de tela no tejida SMS. Todos los componentes son libres de látex y poseen tratamiento de repelencia a fluidos.
- Nuestros productos son de carácter hipoalergénico, antiestático, no liberan pelusas, son resistente al rasgado y desgastes.
- Inflamabilidad: Baja. Declarada de Clase I por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) bajo el código federal de regulaciones (CFR) de ropas textiles 1610.

B) Contraindicaciones y Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco en una temperatura no mayor a 30°C con una humedad relativa bajo el 80%.
- Evite la exposición directa al sol.
- Producto descartable de un solo uso y no reutilizable.
- Evite manipular los componentes del paquete sin antes contar con equipos de protección personal estériles puestos.
- No utilizar el paquete si se encuentre abierto o deteriorado.

C) Instrucciones de Uso

1. Lavarse y secarse bien las manos con la toalla absorbente disponible en el paquete y colocarse las batas bajo los procedimientos de la institución (o utilizar los de nuestra ficha técnica de Batas estándar).
2. Disponer la cubre mesa mayo y de instrumental reforzado sobre los utensilios médicos de arsenalera antes de colocar el resto de los componentes a trabajar.
3. Coloque el campo abdominal para cubrir la zona ventral y superior del paciente y fije bien los adhesivos junto al refuerzo absorbente. Luego utilice al campo mediano para terminar de cubrir al paciente.
4. Coloque las cubrepiernas del paciente desde el pie hasta el muslo por ambos costados.
5. Oriente el campo bajo glúteo con el cuerpo del paciente, y deslice las manos con el dibujo de la mano correspondiente. Luego deslice el campo debajo del cuerpo del paciente y estire el pouch con el colector de fluidos. Es importante retirar las cintas adhesivas del campo una vez se haya alineado en el lugar de cirugía.
6. Situar las suturas o desechos en la bolsa dispuesta en el paquete.
7. Durante el procedimiento, se sugiere usar los paños disponibles para reducir el exceso de humedad o secreciones. Dependiendo del protocolo de la institución, también puede ser utilizado para procesos de clorado y esterilización posterior al procedimiento quirúrgico realizado.
8. Utilice la sabanita de bebé para cubrir al recién nacido.

D) Garantía

Nuestros paquetes de Ropa Quirúrgica cuentan con 5 años de garantía.


REF.	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	07-15L	Bata quirúrgica estándar talla L con toalla y envoltorio	1
B	07-20L	Bata quirúrgica reforzada talla L	1
C	75-1710	Toalla absorbente	3
D	07-1602	Campo mediano II (114cm x 180cm)	1
E	75-1730	Bolsa para suturas	1
F	75-1703	Cubre mesa mayo reforzado (79cm x 150cm)	1
G	75-1615	Cubre mesa instrumental reforzado (110cm x 225cm)	1
H	30-BY-Y	Sabana para bebé (75cm x 86cm)	1
I	75-1708	Cubre piernas (80cm x 125cm)	2
J	75-2309	Campo abdominal (100cm x 150cm) con adhesivo y refuerzo absorbente (25cm x 37.5cm)	1
K	75-1501	Campo bajo glúteo con colector de fluidos (100cm x 113cm)	1
F	75-ETO	Incluye testigo de esterilización interno interno y externo	

TEJIDO SMS

(Spunbond / Meltblown / Spunbond)

Los dispositivos médicos que están conformados con material de SMS (3 capas de polímeros de polipropileno) deben su nombre al proceso de fabricación con el cual se estructura la capa. Los procesos se llaman Spunbond / Meltblown / Spunbond, de ahí su nombre SMS. Las dos capas externas le confieren las características de impermeabilidad (tejido hidrófugo), resistencia al rasgado y antiestático (protegiendo al paciente y sus usuarios, eliminando la electricidad estática), en resumen es una excelente barrera física. La capa intermedia Meltblown es un filtro bacteriológico que permite proteger al usuario y al paciente de un 99% de bacterias transformándose en un protector biológico.

Componentes

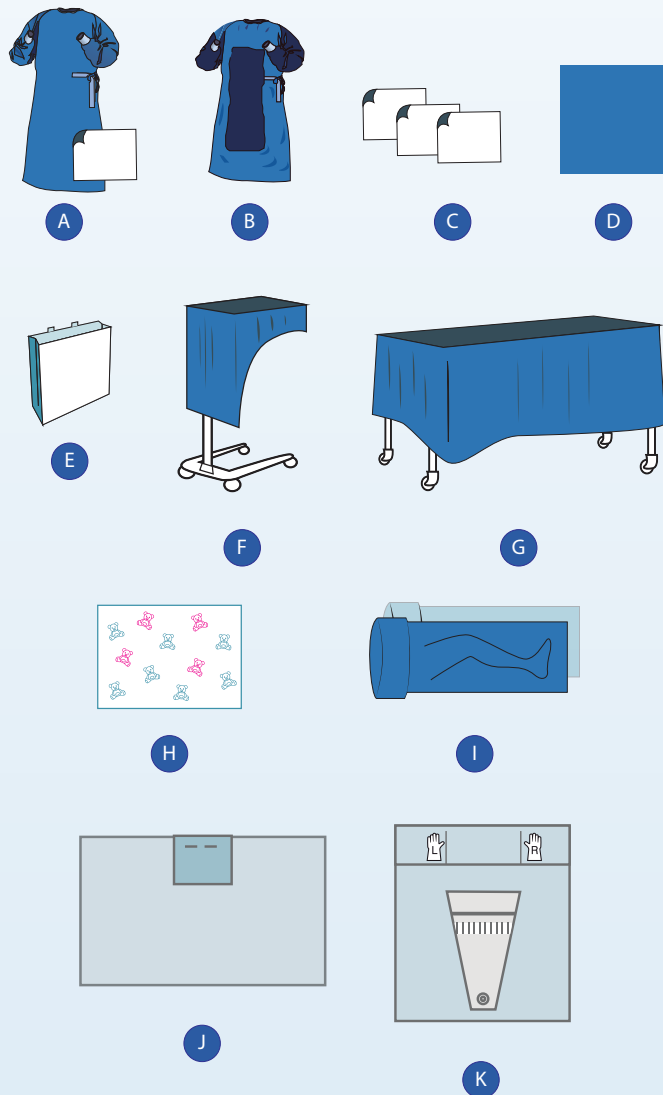

- Capa resistente al rasgado
- Impermeable
- Antiestático
- No libera pelusas

- Filtro bacteriano 99%

- Capa resistente al rasgado
- Impermeable
- Antiestático
- No libera pelusas