

Paquete de Cesárea

Código: 75-P390S



Empaque:
6 unidades / caja



Descripción:

Paquete quirúrgico estéril desechable, diseñado para procedimientos de parto que requieran intervención quirúrgica ajustable al paciente. Sus componentes, mantienen una adaptación de cobertura resistente e impermeable en la zona de cirugía a intervenir. Su campo de cesárea con área de incisión y colector de fluidos ofrece, una rápida y fácil aplicación.

A) Especificaciones Técnicas

- El paquete provee una excelente comodidad al usuario y es recomendable para personal de salud que ejerza una interacción directa con pacientes en zonas estrictas de esterilidad en pabellón.
- Contiene 12 piezas estériles, con campos impermeables y absorbentes de color celeste elaborado a base de tela no tejida SMS.
- Todos los componentes son libres de látex y poseen tratamiento de repelencia a fluidos.
- Nuestros productos son de carácter hipoalérgico, antiestático, no liberan pelusas, son resistente al rasgado y desgastes.
- Inflamabilidad: Baja. Declarada de Clase I por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) bajo el código federal de regulaciones (CFR) de ropas textiles 1610.
- Empaque grado médico de polietileno.
- Incluye testigo de esterilización externo e interno.

B) Contraindicaciones y Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco en una temperatura no mayor a 30°C con una humedad relativa bajo el 80%.
- Evite la exposición directa al sol.
- Producto descartable de un solo uso y no reutilizable.
- Evite manipular los componentes del paquete sin antes contar con equipos de protección personal estériles puestos.
- No utilizar el paquete si se encuentre abierto o deteriorado.

C) Instrucciones de Uso

- 1)** Lavarse y secarse bien las manos con las toallas absorbentes disponibles en el paquete y colocarse las batas bajo los procedimientos de la institución (o utilizar los de nuestra ficha técnica de Batas estándar).
- 2)** Disponer la cubre mesa mayo y de instrumental reforzado sobre los utensilios médicos de arsenalera antes de colocar el resto de los componentes a trabajar.
- 3)** Retire el protector adhesivo y oriente el campo de cesárea en el centro del abdomen del paciente, desdóblelo lateralmente y extiéndalo hacia la cabeza, y luego, hacia los pies del paciente. Elimine las burbujas de aire del film adhesivo con una toalla absorbente en forma circular desde adentro hacia fuera de la fenestración. Estire el colector de fluidos inserto en el campo para el procedimiento de cirugía.
- 4)** Situar las suturas o desechos en la bolsa dispuesta en el paquete.
- 5)** Utilice la sabanita de bebé para cubrir al recién nacido.

D) Garantía

Nuestros paquetes de ropa quirúrgica cuentan 5 años de garantía.



Single use
Uso único

STERILE EO


Ø LATEX - FREE
Ø SIN - LATEX

LOT



REF.	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	07-25L	Bata quirúrgica estándar con zonas impermeables, toalla y envoltorio	1
B	07-20L	Bata quirúrgica estándar con zonas impermeables talla L	2
C	75-1710	Toalla Absorbente (30cm x 40cm)	4
D	75-1730	Bolsa para sutura (16cm x 30cm)	1
E	75-1703	Cubre mesa mayo reforzado (75cm x 150cm)	1
F	75-1615	Cubre mesa instrumental reforzado (110cm x 225cm)	1
G	30-BY-B	Sábana para bebé (100cm x 80cm)	1
H	75-2401	Campo para cesárea (195cm x 255cm x 302.5cm) con área de incisión adhesiva (23.75cm x 18.75cm) y colector de fluidos en 360°	1

Componentes

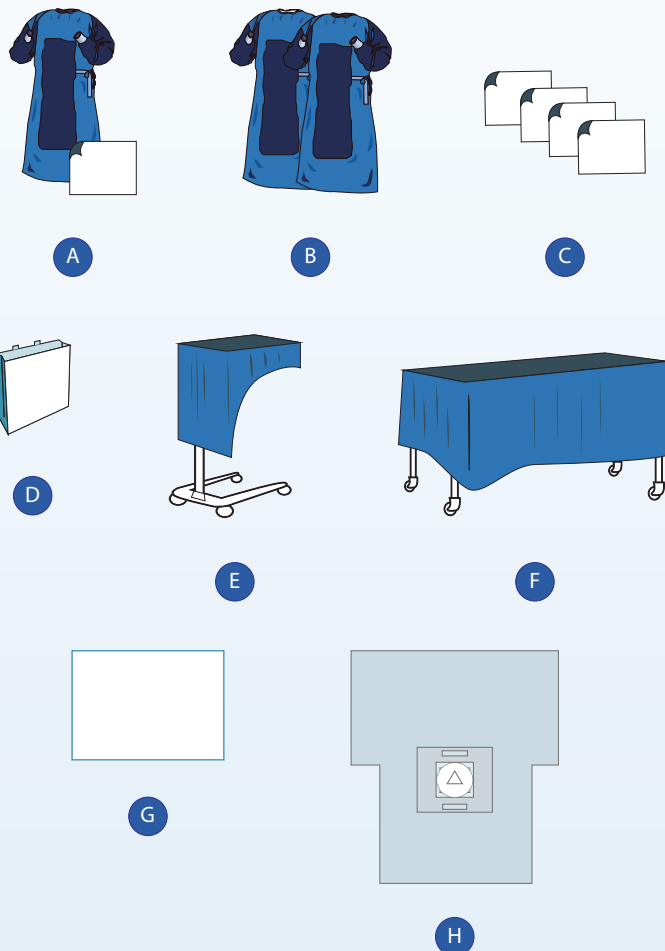

TEJIDO SMS (Spunbond / Meltblown / Spunbond)

Los dispositivos médicos que están conformados con material de SMS (3 capas de polímeros de polipropileno) deben su nombre al proceso de fabricación con el cual se estructura la capa. Los procesos se llaman Spunbond / Meltblown / Spunbond, de ahí su nombre SMS. Las dos capas externas le confieren las características de impermeabilidad (tejido hidrófugo), resistencia al rasgado y antiestático (protegiendo al paciente y sus usuarios, eliminando la electricidad estática), en resumen es una excelente barrera física. La capa intermedia Meltblown es un filtro bacteriológico que permite proteger al usuario y al paciente de un 99% de bacterias transformándose en un protector biológico.

