

Paquete Universal 4 Campos

Modelo: 75-P133S+



Empaque:

8 unidades / caja



Descripción:

Paquete quirúrgico estéril desechable, diseñado para cirugías de todo tipo que requieran una adaptación flexible de fenestración y colocación en la zona de cirugía a intervenir. Nuestro paquete quirúrgico cumple con certificación **ISO 13485**.

A) Especificaciones Técnicas

- El paquete provee una excelente comodidad al usuario y es recomendable para personal de salud que ejerza una interacción directa con pacientes en zonas estrictas de esterilidad en pabellón.
- Contiene 16 piezas estériles elaboradas en tela no tejida. Incluye campos impermeables y absorbentes de color celeste (SPP+PE), con refuerzos hidrofílicos de 55g de spunbond (SS). Además, incorpora batas estándar y reforzadas, confeccionadas en material SMS
- Todos los componentes son libres de látex
- Nuestros productos son de carácter hipoalergénico, antiestático, no liberan pelusas, son resistente al rasgado y desgastes.
- El material del campo quirúrgico cumple con los siguientes estándares: ASTM 1670 (Método de prueba estándar para la resistencia de los materiales utilizados en ropa protectora a la penetración de sangresintética); e Inflamabilidad de los textiles de la ropa CPSC 16 CFR Parte 1610"

B) Contraindicaciones y Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco en una temperatura no mayor a 30°C con una humedad relativa bajo el 80%.
- Evite la exposición directa al sol.
- Producto descartable de un solo uso y no reutilizable.
- Evite manipular los componentes del paquete sin antes contar con equipos de protección personal estériles puestos.
- No utilizar el paquete si se encuentre abierto o deteriorado.

C) Instrucciones de Uso

- 1)** Lavarse y secarse bien las manos con las toallas absorbentes disponibles en el paquete y colocarse las batas bajo los procedimientos de la institución (o utilizar los de nuestra ficha técnica de Batas estándar).
- 2)** Disponer la cubre mesa mayo y de instrumental reforzado sobre los utensilios médicos de arsenalera antes de colocar el resto de los componentes a trabajar.
- 3)** Colocar el campo superior, inferior y laterales, por consiguiente, para precisar el tipo de cirugía a realizar. Retirar las cintas adhesivas una vez se hayan fijado en el lugar adecuado.
- 4)** Situar las suturas o desechos en la bolsa dispuesta en el paquete.
- 5)** Durante el procedimiento, se sugiere usar los paños disponibles para reducir el exceso de humedad o secreciones.

D) Garantía

Nuestros paquetes de Ropa Quirúrgica cuentan con 5 años de garantía.

E) Testigo de Esterilización


Nuestros paquetes cuentan con testigo de esterilización interno y externo. La esterilización tiene una vigencia de 5 años.

F) Simbología



Componentes

REF.	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	07-15L	Bata quirúrgica estándar talla L con toalla y envoltorio	1
B	75-1730	Bolsa para suturas (16cm x 27cm)	1
C	75-1710	Toalla Absorbente (39cm x 45cm)	2
D	07-20XL	Bata quirúrgica estándar Reforzada, talla XL	2
E	75-1703	Cubremesa mayo reforzada 79cm x 155cm	1
F	75-1741	Paño Clínico con cinta adhesiva 65cm x 37,5cm	4
G	75-1610	Cubremesa instrumental reforzado (150cm x 228cm)	1
H	75-1621	Campo superior con adhesivo (255cm x 150cm) y refuerzo absorbente (60cm x 35cm)	1
I	75-1624	Campo inferior con adhesivo (200cm x 193cm) y refuerzo absorbente (60cm x 35cm)	1
J	75-1628	Campos laterales con adhesivo completo (193cm x 114cm) y refuerzo absorbente (60cm x 35cm)	2
K	75-ETO	Incluye testigo de esterilización interno y externo	

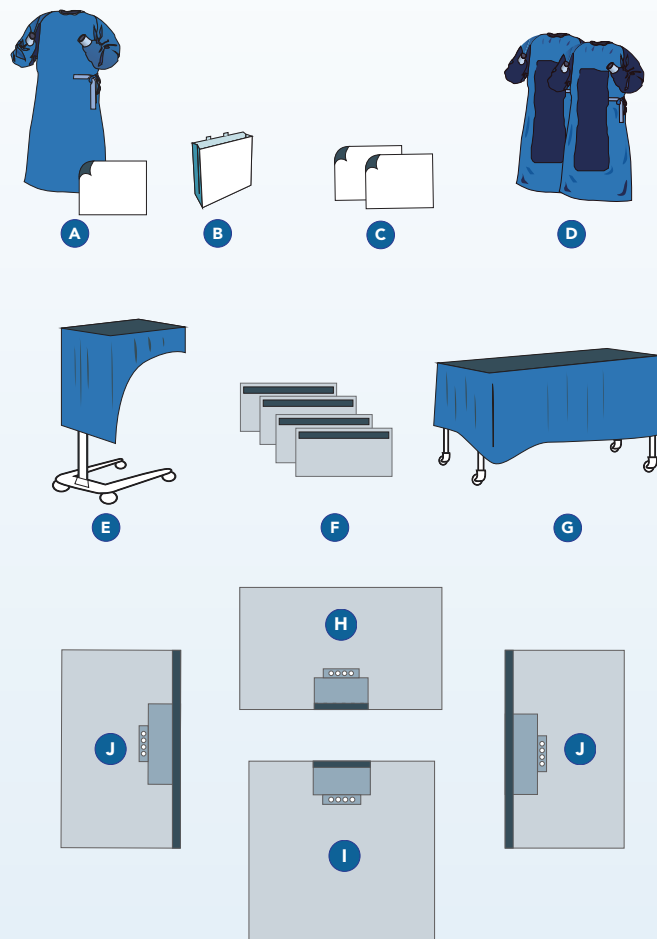

TEJIDO SMS

Los dispositivos médicos que están conformados con material de SMS (3 capas de polímeros de polipropileno) deben su nombre al proceso de fabricación con el cual se estructura la capa.

Los procesos se llaman:

Spunbond / Meltblown / Spunbond

Las dos capas externas le confieren las características de impermeabilidad (tejido hidrófugo), resistencia al rasgado y antiestático (protegiendo al paciente y sus usuarios, eliminando la electricidad estática). En resumen es una excelente barrera física. La capa intermedia Meltblown es un filtro bacteriológico que permiten proteger al usuario y al paciente de un 99% de bacterias, transformándose en un protector biológico.

