

Paquete Cardiovascular

Código: 75-P265S



Empaque:
5 unidades / caja



Descripción:

Paquete quirúrgico estéril desechable, diseñado para procedimientos cardiovasculares. Sus componentes, mantienen una adaptación de cobertura resistente e impermeable en la zona de cirugía a intervenir. Su campo cardiovascular extra grueso con apertura otorga mayor seguridad absorbente y resistencia al desgarrar durante el procedimiento. Además, contiene bolsillos laterales para acomodar tubos y otros accesorios.

A) Especificaciones Técnicas

- El paquete provee una excelente comodidad al usuario y es recomendable para personal de salud que ejerza una interacción directa con pacientes en zonas estrictas de esterilidad en pabellón.
- Contiene 19 piezas estériles, con campos impermeables y absorbentes de color celeste elaborado a base de tela no tejida SMS.
- Todos los componentes son libres de látex y poseen tratamiento de repelencia a fluidos.
- Nuestros productos son de carácter hipoalérgico, antiestático, no liberan pelusas, son resistente al rasgado y desgastes.
- Inflamabilidad: Baja. Declarada de Clase I por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) bajo el código federal de regulaciones (CFR) de ropas textiles 1610.

B) Contraindicaciones y Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco en una temperatura no mayor a 30°C con una humedad relativa bajo el 80%.
- Evite la exposición directa al sol.
- Producto descartable de un solo uso y no reutilizable.
- Evite manipular los componentes del paquete sin antes contar con equipos de protección personal estériles puestos.
- No utilizar el paquete si se encuentre abierto o deteriorado.

D) Garantía

Nuestros paquetes de ropa quirúrgica cuentan 5 años de garantía.

C) Instrucciones de Uso


- 1)** Lavarse y secarse bien las manos con la toalla absorbente disponible en el paquete y colocarse las batas bajo los procedimientos de la institución (o utilizar los de nuestra ficha técnica de Batas estándar y reforzada).
- 2)** Disponer la cubre mesa mayo y de instrumental reforzado sobre los utensilios médicos de arsenalera antes de colocar el resto de los componentes a trabajar.
- 3)** Coloque el campo bilateral con cobertor perineal debajo de las piernas del paciente junto a los glúteos. Desdoble el campo lateralmente y luego hacia los pies del paciente. Extienda la cubierta perineal impermeable y descubra el adhesivo de la misma, dejando sin tocar la cubierta para el área umbilical. Levante la cubierta perineal y pásela entre las piernas del paciente para adherirlas a la piel. Desdoble la cubierta umbilical y quite la cinta protectora para adherirla al paciente.
- 4)** Retire el protector adhesivo y oriente el campo cardiovascular extra grueso en el pecho del paciente con la parte superior de la fenestración por arriba del esternón. Desdoble el campo lateralmente y luego hacia la cabeza del paciente para formar una ventana de anestesia. Extienda las coberturas del campo a medida que la vaya abriendo hacia los pies del paciente. Finalmente, inserte los tubos o accesorios en los bolsillos laterales del campo.
- 5)** Durante el procedimiento, se sugiere usar los paños disponibles para reducir el exceso de humedad o secreciones. Dependiendo del protocolo de la institución, también puede ser utilizado para procesos de clorado y esterilización posterior al procedimiento quirúrgico realizado.

REF.	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	07-25L	Bata quirúrgica estándar con zonas impermeables talla L con toalla y envoltorio	1
B	75-1730	Bolsa para sutura	1
C	75-1710	Toalla Absorbente	2
D	75-20XL	Bata quirúrgica estándar con zonas impermeables talla XL	2
E	75-1703	Cubre mesa mayo reforzado (75cm x 150cm)	1
F	75-1741	Paño clínico (65cm x 37.5cm) con cinta adhesiva	8
G	75-1912	Campo Cardiovascular con apertura extra grueso (210cm x 265cm x 368.75cm)	1
H	75-1908	Campo bilateral con cobertor perineal (205cm x 187.5cm)	1
I	75-1604	Campo grande (150cm x 180cm)	1
J	75-1616	Cubre mesa instrumental extra grueso (192.5cm x 275cm)	1

TEJIDO SMS (Spunbond / Meltblown / Spunbond)

Los dispositivos médicos que están conformados con material de SMS (3 capas de polímeros de polipropileno) deben su nombre al proceso de fabricación con el cual se estructura la capa. Los procesos se llaman Spunbond / Meltblown / Spunbond, de ahí su nombre SMS. Las dos capas externas le confieren las características de impermeabilidad (tejido hidrófugo), resistencia al rasgado y antiestático (protegiendo al paciente y sus usuarios, eliminando la electricidad estática), en resumen es una excelente barrera física. La capa intermedia Meltblown es un filtro bacteriológico que permite proteger al usuario y al paciente de un 99% de bacterias transformándose en un protector biológico.

Componentes

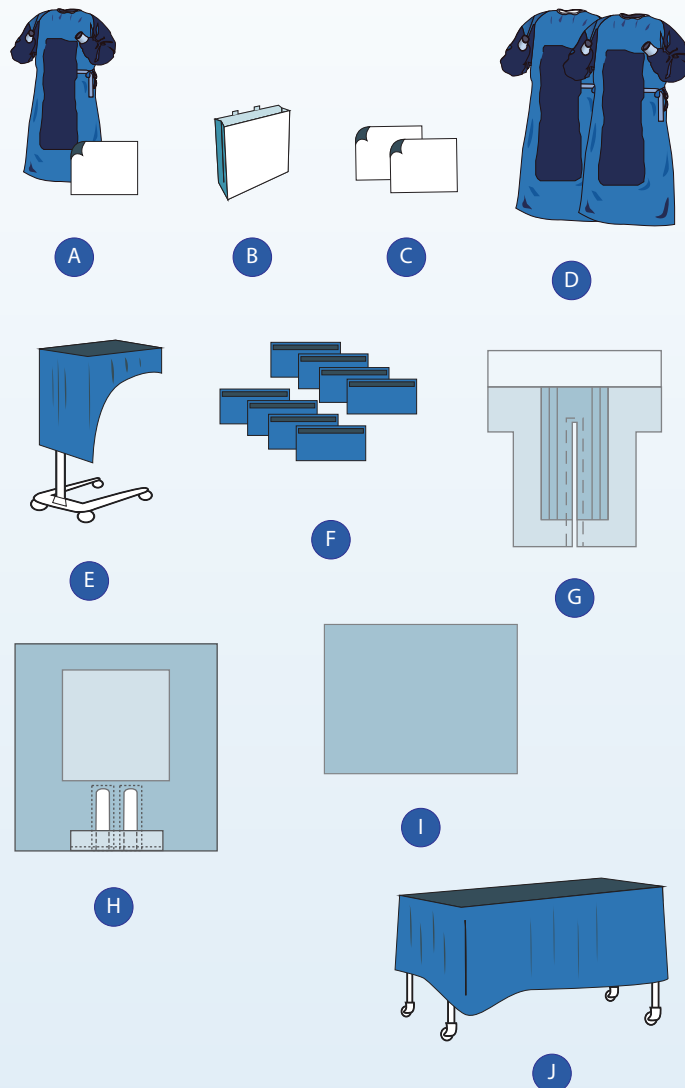

- Capa resistente al rasgado
- Impermeable
- Antiestático
- No libera pelusas

- Filtro bacteriano 99%

- Capa resistente al rasgado
- Impermeable
- Antiestático
- No libera pelusas