

Paquete de Cistoscopia

Código: 75-P270S



Empaque:

10 unidades / caja



Descripción:

Paquete quirúrgico estéril desechable, diseñado para procedimientos de examinación en abdomen inferior, como la vejiga o uretra. Sus componentes, mantienen una adaptación de cobertura resistente e impermeable en la zona de cirugía a intervenir.

A) Especificaciones Técnicas

- El paquete provee una excelente comodidad al usuario y es recomendable para personal de salud que ejerza una interacción directa con pacientes en zonas estrictas de esterilidad en pabellón.
- Contiene 9 piezas estériles, con campos impermeables y absorbentes de color celeste elaborado a base de tela no tejida SMMS de 45g/m².
- Todos los componentes son libres de látex y poseen tratamiento de repelencia a fluidos.
- Nuestros productos son de carácter hipoalergénico, antiestático, no liberan pelusas, son resistente al rasgado y desgastes.
- El material del campo quirúrgico cumple con los siguientes estándares: ASTM 1670 (Método de prueba estándar para la resistencia de los materiales utilizados en ropa protectora a la penetración de sangre sintética); e Inflamabilidad de los textiles de la ropa CPSC 16 CFR Parte 1610"

B) Contraindicaciones y Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco en una temperatura no mayor a 30°C con una humedad relativa bajo el 80%.
- Evite la exposición directa al sol.
- Producto descartable de un solo uso y no reutilizable.
- Evite manipular los componentes del paquete sin antes contar con equipos de protección personal estériles puestos.
- No utilizar el paquete si se encuentre abierto o deteriorado.

C) Testigo de Esterilización

Nuestros paquetes cuentan con testigo de Esterilización Interno. La esterilización tiene una vigencia de 5 años.

D) Instrucciones de Uso

- 1) Lavarse y secarse bien las manos con las toallas absorbentes disponibles en el paquete y colocarse las batas bajo los procedimientos de la institución (o utilizar los de nuestra ficha técnica de Batas estándar).
- 2) Disponer la cubre mesa mayo y de instrumental reforzado sobre los utensilios médicos de arsenalera antes de colocar el resto de los componentes a trabajar.
- 3) Coloque las cubrepiernas del paciente desde el pie hasta el muslo por ambos costados.
- 4) Oriente el campo de cistoscopia desde la zona ventral inferior del paciente, utilizando la fenestración perineal como guía, y realice la apertura hacia la cabeza y luego hacia las piernas del paciente. Es importante retirar las cintas adhesivas del campo una vez se haya alineado en el lugar adecuado de incisión al paciente. Recuerde orientar la malla urológica con el refuerzo absorbente bajo la zona de los glúteos del paciente y colocar los tubos de drenaje en los sujetadores superiores sobre la fenestración.
- 5) Situar las suturas o desechos en la bolsa dispuesta en el paquete.

E) Garantía


Nuestros paquetes de Ropa Quirúrgica cuentan con 5 años de garantía.

F) Simbología



Componentes

REF.	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	07-15L	Bata quirúrgica estándar talla L con toalla y envoltorio	1
B	75-1730	Bolsa para suturas (16cm x 30cm)	1
C	75-1710	Toalla Absorbente (30cm x 40cm)	1
D	07-00L	Bata quirúrgica estándar talla L	1
E	75-1703	Cubre mesa mayo reforzada 75cm x 150cm	1
F	75-1708	Cubrepiernas (72.5cm x 120cm)	2
G	75-2800	Campo para Cistoscopia (155cm x 100cm x 250cm) con fenestración perineal (8.75cm x 16.25cm), refuerzo absorbente (40cm x 95cm) y malla urológica (25cm x 25cm)	1
H	75-1615	Cubre mesa instrumental reforzado (110cm x 225cm)	1
I	75-ETO	Incluye testigo de esterilización interno	

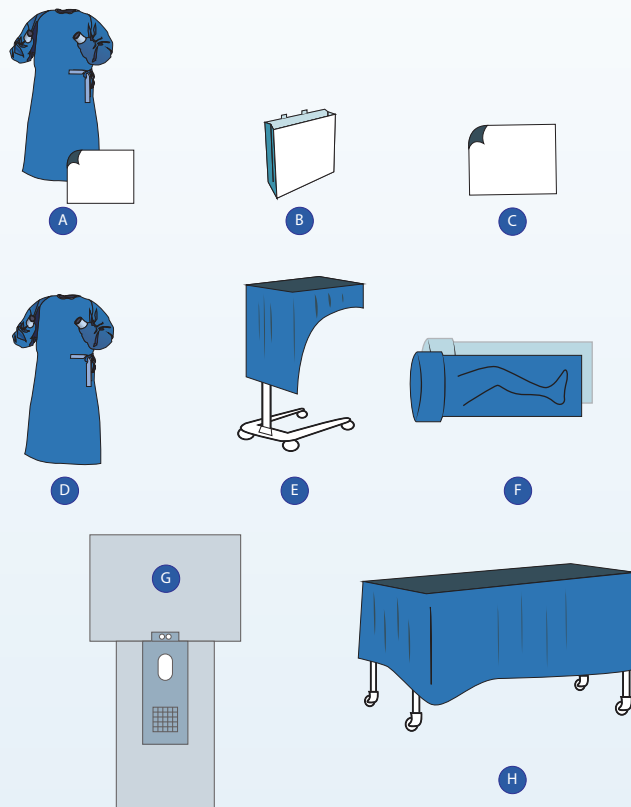

TEJIDO SMMS

(Spunbond / Meltblown / Meltblown/ Spunbond)

Los dispositivos médicos que están conformados con material de SMMS (4 capas de polímeros de polipropileno) deben su nombre al proceso de fabricación con el cual se estructura la capa.

Los procesos se llaman:

Spunbond / Meltblown / Meltblown / Spunbond

Las dos capas externas le confieren las características de impermeabilidad (tejido hidrófugo), resistencia al rasgado y antiestático (protegiendo al paciente y sus usuarios, eliminando la electricidad estática). En resumen es una excelente barrera física. Las capas intermedias Meltblown son un filtro bacteriológico que permiten proteger al usuario y al paciente de un 99% de bacterias, transformándose en un protector biológico.

