

Paquete Cirugía Menor

Código: 75-P763S



Empaque:

20 unidades / caja



Descripción:

Paquete de instrumentación estéril desechable, diseñado para cirugías simples en procedimientos quirúrgicos.

A) Especificaciones Técnicas

- El paquete provee una excelente comodidad al usuario y es recomendable para personal de salud que ejerza una interacción directa con pacientes en zonas estrictas de esterilidad en pabellón.
- Contiene 6 piezas estériles, con campos impermeables y absorbentes de color celeste elaborados en base a tela no tejida SMS
- Todos los componentes son libres de látex y poseen tratamiento de repelencia a fluidos.
- Nuestros productos son de carácter hipoalergénico, antiestático, no liberan pelusas, son resistente al rasgado y desgastes.
- El material del campo quirúrgico cumple con los siguientes estándares: ASTM 1670 (Método de prueba estándar para la resistencia de los materiales utilizados en ropa protectora a la penetración de sangre sintética); e Inflamabilidad de los textiles de la ropa CPSC 16 CFR Parte 1610"

B) Contraindicaciones y Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco en una temperatura no mayor a 30°C con una humedad relativa bajo el 80%.
- Evite la exposición directa al sol.
- Producto descartable de un solo uso y no reutilizable.
- Evite manipular los componentes del paquete sin antes contar con equipos de protección personal estériles puestos.
- No utilizar el paquete si se encuentre abierto o deteriorado.

C) Instrucciones de Uso

- 1)** Colocarse las batas bajo los procedimientos de la institución (o utilizar los de nuestra ficha técnica de Batas estándar).
- 2)** Situar los campos quirúrgicos en el área de intervención ya que estos, fueron diseñados para cubrir al paciente en procedimientos ambulatorios simples.
- 3)** Disponer las compresas estériles en las zonas exclusivas donde se realizará el procedimiento quirúrgico, para contener eventuales hemorragias y la absorción de fluidos corporales. También puede ser utilizado para el posterior secado de manos en caso de que sobre alguna unidad.

D) Garantía

Nuestros paquetes cuentan con testigo de Esterilización Interno. La esterilización tiene una vigencia de 5 años.

E) Testigo de Esterilización

Nuestros paquetes cuentan con testigo de Esterilización Interno

F) Simbología




REF.	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	07-01L	Bata Quirúrgica talla L	1
B	LAP-002	Compresa de Laparotomía	2
C	75-RSMS	Campo Quirúrgico 80cm x 80 cm con fenestración de 6cm x 14cm con adhesivo	1
D	75-1750	Campo quirúrgico de 80cm x 80 cm	1
E	75-1751	Envoltorio de 80cm x 80cm	1
F	75-ETO	Incluye testigo de esterilización interno	




A




B

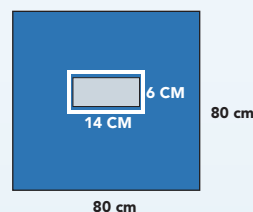

C

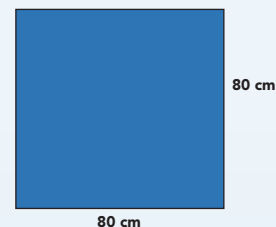

D

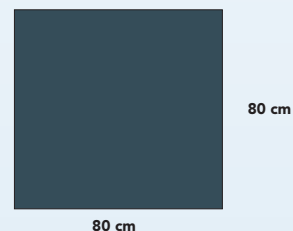

E

TEJIDO SMS (Spunbond / Meltblown / Spunbond)

Los dispositivos médicos que están conformados con material de SMS (3 capas de polímeros de polipropileno) deben su nombre al proceso de fabricación con el cual se estructura la capa. Los procesos se llaman Spunbond / Meltblown / Spunbond, de ahí su nombre SMS. Las dos capas externas le confieren las características de impermeabilidad (tejido hidrófugo), resistencia al rasgado y antiestático (protegiendo al paciente y sus usuarios, eliminando la electricidad estática), en resumen es una excelente barrera física. La capa intermedia Meltblown es un filtro bacteriológico que permite proteger al usuario y al paciente de un 99% de bacterias transformándose en un protector biológico.

- Capa resistente al rasgado
- Impermeable
- Antiestático
- No libera pelusas

- Filtro bacteriano 99%

- Capa resistente al rasgado
- Impermeable
- Antiestático
- No libera pelusas

